

UNIVERSAALNE DESINFEKTANT

Info

Remal 6 on fosfaadivaba ülddesinfektant ruumide, pindade (seinad, ukseid, mööbel), nakkusohtlikult saastunud instrumentide ja toidunõude desinfitseerimiseks. Hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, seeni, viirusi (s.h. HBV, HIV ja sh seagripi A/H1N1 viirus).

Koostis

didetsüüldimetüülammooniumkloriid, alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid

Kasutamine

Sobib kasutada dushiruumides, saunades jalaseene hävitamiseks ja ärahoidmiseks. Keldrites ja hoidlates likvideerib hallituse. Sobib niiskete kastide (puuvili, juurvili, saiad jne.) desinfitseerimiseks. Silmaga nähtava mustuse korral enne desinfitseerimist pinna pesemine on vajalik. Toidutööstuses kasutada ruumide, tööpindade ja seadmete desinfektsiooniks.

Hoolduseks :

1 %-line lahus	10 min. (minimaalne aeg 5 min.)
----------------	----------------------------------

Nakkusohtlikud instrumendid (v.a. kirurgi-, stomatoloogia ja limaskestadega kokku puutuvad instrumendid):

2 %-line lahus	10-15 min. (minimaalne aeg 5 min.)
----------------	------------------------------------

Toiduainetega kokkupuutuvad esemed:

2 %-line lahus	10-15 min. (minimaalne aeg 5 min.)
----------------	------------------------------------

Seagripi A/H1N1 viirusega saastatud esemed:

2 %-line lahus	10-15 min. (minimaalne aeg 5 min.)
----------------	------------------------------------

Dushiruumid ja saunad:

1 %-line lahus	10-15 min. (minimaalne aeg 5 min.)
----------------	------------------------------------

Töölahuse korduvkasutamine sõltub desinfitseerivate esemete kogusest ja määrdumisastmest.

Sobib kasutamiseks Rohelise Võtme (Green Key) ettevõtetes.

Sobib kasutamiseks ka laste- ja tervishoiuasutustes.

Hoida temperatuuril üle 0 °C.

REMAL 6

Pakend

1L pudel

5L kanister

Erimärkused

- ♦ vahendi sattumisel silma, suhu või nahale loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole
- ♦ kontsentratsiooniga töötamisel kasutada kaitsekindaid
- ♦ teised pesuained või nende jäägid pindadel võivad vähendada desinfitseerivat toimet
- ♦ tootes kasutatud komponendid on looduses bioloogiliselt lagunevad
- ♦ pH 6.5-7.5